


1. Ta teststrippen ut av forpakningen umiddelbart før bruk (vær oppmerksom på at testen har rom temperatur og at utløpsdatoen ikke er overskredet før forpakningen åpnes).
2. Dypp og hold teststrippen ca. 1 cm ned i urinen og vent til urinen begynner å trekke opp i filtret.
3. Legg testen på en plan overflate.

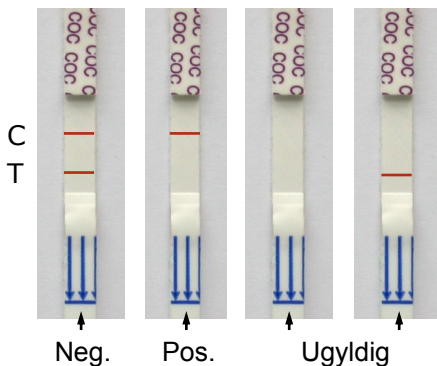

Slik avleses testen

4. Testen er klar til avlesning etter ca. 3 min.
5. Før testen avleses skal en sikre seg at kontrollstreken (C) er fremkommet, hvis denne ikke er synlig kan testen ikke anvendes. Kontrollstreken indikerer at testen er korrekt utført og at den riktige mengde urin er tilført.
6. Hvis både kontrollstreken (C) og teststreken (T) er synlig etter 3 minutter er testresultatet negativt og avlesningen avsluttes.
7. Hvis kun kontrollstreken (C) er synlig etter 3 minutter skal man vente ytterligere 5-7 minutter med å avlese. Hvis teststreken (T) ikke er fremkommet etter totalt 10 minutter er testresultatet positivt.

Testresultat skal aldri avleses etter 10 minutter.


Testresultat

8. Negativ: når både kontrollstrek (C) og teststrek (T) er synlig i avlesningsfeltet (se bilde).
 9. Positiv: når kun kontrollstrek (C) er synlig i avlesningsfeltet (se bilde).
- Kontroll- og teststrekene kan variere i tydelighet, synlighet og styrke, samt fremkomme på forskjellige tidspunkter. MEN minste antydning av teststrek (T) skal tolkes som et negativt svar.

1. Ta testplaten ut av forpakningen umiddelbart før bruk (vær oppmerksom på at testen har rom temperatur og at utløpsdatoen ikke er overskredet før forpakningen åpnes). Utfyll eventuelt test ID og dato.





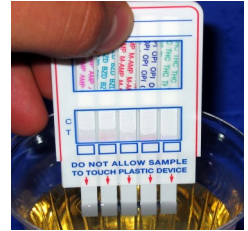















2. Fjern plashetten. Dypp og hold halvdelen av teststripsens lengde ned i urinen og vent til urinen begynner å trekke opp i alle filterene. Ta testplaten opp når urinen er nådd til linje (T) i alle feltene.



3. Legg testplaten på en plan overflate.

Manipulasjonskontroll

Snu testplaten for å kontrollere om testurinen er manipulert. Resultatet avleses ved å sammenligne fargeskjemaet på testen. →

	Abnormal					Normal		
Oxidant/ PCC						Negative		
	Low	High						
CRE								
	0mg/dl	10mg/dl			20mg/dl	100mg/dl		
pH								
	2.0	3.0	10.0	11.0	12.0	4.0	7.0	9.0
	Low		High					

Slik avleses testen


4. Testen er klar til avlesning etter 3 min.

5. Før testen avleses skal en sikre seg at kontrollstrekene (C) er fremkommet, hvis disse ikke er synlig kan testen ikke anvendes.

Kontrollstrekene indikerer at testen er korrekt utført og at den riktige mengde urin er tilført.

6. Hvis både kontrollstrekene (C) og alle teststrekene (T) er synlig etter 3 minutter er testresultatet negativt og avlesningen avsluttes.

7. Hvis kun kontrollstrekene (C) er synlig etter 3 minutter skal man vente ytterligere 5-7 minutter med å avlese. Hvis alle teststrekene (T) ikke er fremkommet etter totalt 10 minutter er testresultatet positivt.

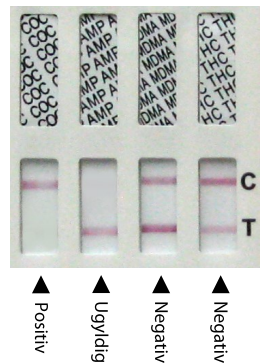

Testresultat skal aldri avleses etter 10 minutter.

8. Negativ: når både kontrollstrekene (C) og teststrekene (T) er synlige i avlesningsfeltet (se bilde).


9. Positiv: når kontrollstrekene (C) er synlige og en eller flere teststreker (T) mangler i avlesningsfeltet (se bilde).

Kontroll- og teststrekene kan variere i tydelighet, synlighet og styrke, samt fremkomme på forskjellige tidspunkter. MEN minste antydning av teststrek (T) skal tolkes som et negativt svar.

1. Ta testplaten ut av forpakningen umiddelbart før bruk (vær oppmerksom på at testen har rom temperatur og at utløpsdatoen ikke er overskredet før forpakningen åpnes). Utfyll eventuelt test ID og dato.



2. Fjern plashetten. Dypp og hold halvdelen av teststripsens lengde ned i urinen og vent til urinen begynner å trekke opp i alle filterne. Ta testplaten opp når urinen er nådd til linje (T) i alle feltene.

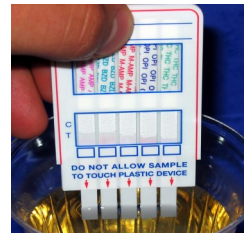

3. Legg testplaten på en plan overflate.

Slik avleses testen

4. Testen er klar til avlesning etter 3 min.


5. Før testen avleses skal en sikre seg at kontrollstrekene (C) er fremkommet, hvis disse ikke er synlig kan testen ikke anvendes. Kontrollstrekene indikerer at testen er korrekt utført og at den riktige mengde urin er tilført.

6. Hvis både kontrollstrekene (C) og alle teststrekene (T) er synlig etter 3 minutter er testresultatet negativt og avlesningen avsluttes.

7. Hvis kun kontrollstrekene (C) er synlig etter 3 minutter skal man vente ytterligere 5-7 minutter med å avlese. Hvis alle teststrekene (T) ikke er fremkommet etter totalt 10 minutter er testresultatet positivt.

8. Negativ: når både kontrollstrekene (C) og teststrekene (T) er synlige i avlesningsfeltet (se bilde).

9. Positiv: når kontrollstrekene (C) er synlige og en eller flere teststreker (T) mangler i avlesningsfeltet (se bilde).

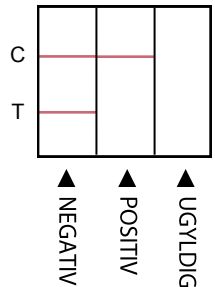

Testresultat skal aldri avleses etter 10 minutter.

8. Negativ: når både kontrollstrekene (C) og teststrekene (T) er synlige i avlesningsfeltet (se bilde).


9. Positiv: når kontrollstrekene (C) er synlige og en eller flere teststreker (T) mangler i avlesningsfeltet (se bilde).

Kontroll- og teststrekene kan variere i tydelighet, synlighet og styrke, samt fremkomme på forskjellige tidspunkter. MEN minste antydning av teststrek (T) skal tolkes som et negativt svar.

1. Ta testplaten ut av forpakningen umiddelbart før bruk (vær oppmerksom på at testen har rom temperatur og at utløpsdatoen ikke er overskredet før forpakningen åpnes). Utfyll eventuelt test ID og dato.



2. Fjern plasthetten. Dypp og hold halvdelen av teststripsens lengde ned i urinen og vent til urinen begynner å trekke opp i alle filterene. Ta testplaten opp når urinen er nådd til linje (T) i alle feltene.

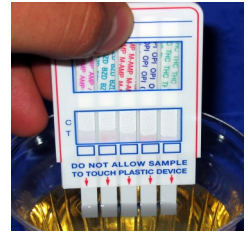











3. Legg testplaten på en plan overflate.

Manipulasjonskontroll


Snu testplaten for å kontrollere om testurinen er manipulert. Resultatet avleses ved å sammenligne fargeskjemaet på testen.



	pH Creatinine		
HIGH			Ferle- Produkter AB
NORMAL			
			
			
LOW			

Slik avleses testen

4. Testen er klar til avlesning etter 3 min.
5. Før testen avleses skal en sikre seg at kontrollstrekene (C) er fremkommet, hvis disse ikke er synlig kan testen ikke anvendes. Kontrollstrekene indikerer at testen er korrekt utført og at den riktige mengde urin er tilført.
6. Hvis både kontrollstrekene (C) og alle teststrekene (T) er synlig etter 3 minutter er testresultatet negativt og avlesningen avsluttes.
7. Hvis kun kontrollstrekene (C) er synlig etter 3 minutter skal man vente ytterligere 5-7 minutter med å avlese. Hvis alle teststrekene (T) ikke er fremkommet etter totalt 10 minutter er testresultatet positivt.

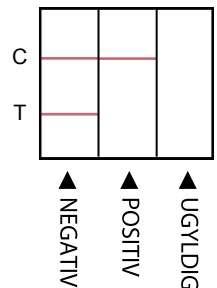

Testresultat skal aldri avleses etter 10 minutter.

8. Negativ: når både kontrollstrekene (C) og teststrekene (T) er synlige i avlesningsfeltet (se bilde).
9. Positiv: når kontrollstrekene (C) er synlige og en eller flere teststreker (T) mangler i avlesningsfeltet (se bilde).

Kontroll- og teststrekene kan variere i tydelighet, synlighet og styrke, samt fremkomme på forskjellige tidspunkter. MEN minste antydning av teststrek (T) skal tolkes som et negativt svar.