

# Bruksanvisning Ferle Saliva narkotikatest


## Prøveindsamling

Der må ikke indtages mad, drikke, tobak eller tyggegummi 10 minutter før prøveindsamling.

1. Pak test og indsamler ud af de forseglede indpakninger.



2. Før indsamleren rundt i munden og på tungen i mindst 3 minutter. Prøven er klar når hele svampen på indsamleren er gennemvædet.

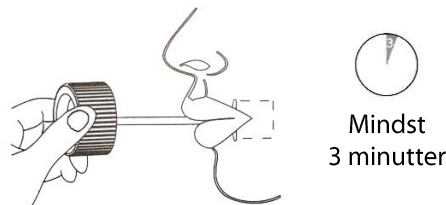

3. Indsæt indsamleren i testbeholderen og skru den fast.



4. Hiv den orange label af testbeholderen og aflæs resultaterne indenfor 3-10 minutter. Hvis alle streger er tydelige efter 3 minutter, eller før, kan resultaterne tolkes som værende negative. Hvis en eller flere streger ikke er synlige efter 3 minutter, skal testen først aflæses efter 10 minutter.



5. **Aflæsning af resultater:** en streg = negativ for den pågældende parameter/narkotika. Mindste antydning af en teststreg, skal tolkes som negativt resultat.

