


SURESTEP™ narkotikatest


Prøveindsamling

Der må ikke indtages mad, drikke, tobak eller tyggegummi 10 minutter før prøveindsamling.

1. Adskil testen.

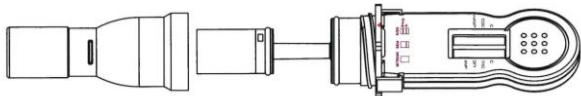


2. Før indsamleren rundt i munden og på tungen i 3 minutter. Prøven er klar når hele svampen på indsamleren er gennemvædet.

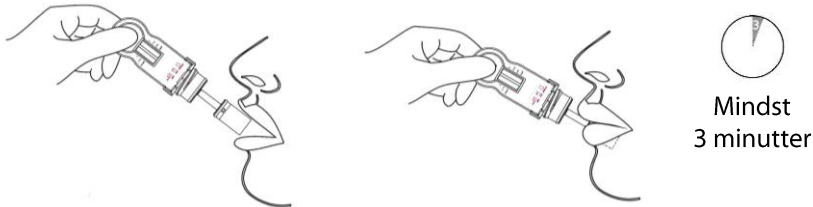

Testudførelse

Indsæt indsamleren lodret helt ned i låget, drej med uret indtil den røde pil er ud for det hvide mærke. Læg testen vandret på en plan overflade og vent 10 min.

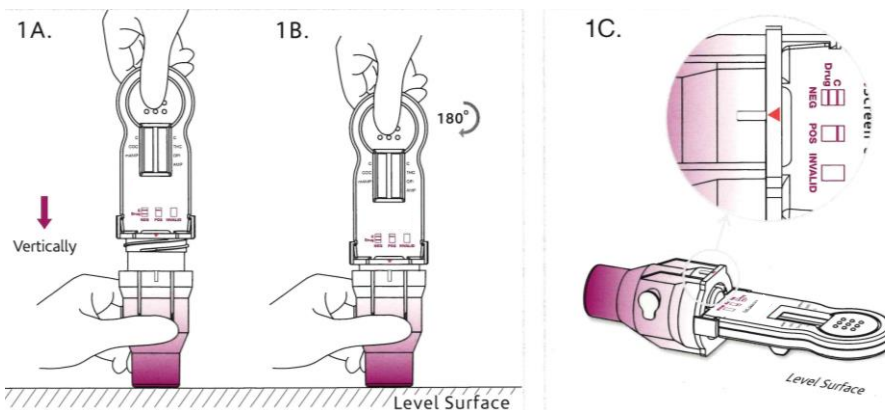

1. Efter 10 minutter kan resultatet aflæses. En strek = negativ for den pågældende parameter/narkotika. Mindste antydning af en teststreg, skal tolkes som negativt resultat.

